



### Life/form® Simulador de Inyección Espinal\*

El Life/form® Simulador de Inyección Espinal es una gran ayuda de enseñanza y aprendizaje que permite una demostración y una práctica realistas de las inyecciones en la columna vertebral. Las técnicas de inyección incluyen anestesia, punciones, analgesia epidural, analgesia caudal y bloqueo de los nervios sacro y lumbar simpático. Excelentes características realistas, además de una columna fácil de cambiar y piel intercambiable, hacen de este producto Life/form® el mejor del mercado. Vea en uso el Life/form® Simulador de Inyección Espinal que muestra una técnica de prevención de Cefalea Postpunción Dural (CPPD) en [www.go-aps.com/spinal/hatfalvi.mpg](http://www.go-aps.com/spinal/hatfalvi.mpg), y para más información sobre prevención de CPPD visite [www.prevent-pdph.org](http://www.prevent-pdph.org). Una cuidadosa réplica de la anatomía asegura la resistencia adecuada a la punción de la aguja y a los puntos de referencia de la palpación exacta. La piel puede cambiarse sin herramientas en minutos, y la columna vertebral puede cargarse con fluidos y acomodarse en posición de sentado o lateral para la práctica de las inyecciones. Las secciones L1 y L2 de la columna vertebral son claramente visibles. La porción funcional de este modelo de inyección incluye las vértebras L3-L5, más el sacro y el cóccix. Incluye bolsa de fluido con conectores, manual de instrucciones y estuche rígido. Tres años de garantía. No incluye aguja ni percha para suministro de fluidos. Peso de envío 27 lbs. (12.25 kg). LF01036U



- 5 Enfoques:
- Epidural • Sacro
- Caudal • Espinal
- Lumbar

### ARTÍCULOS DISPONIBLES

**Juego de Reemplazo Espinal\***  
Con piel, musculatura y médula espinal. Peso de envío 1.75 lbs. (0.79 kg).  
LF01039U

**Juego Lubricante\***  
Botellas de 2 oz. Paquete de 6.  
Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).  
LF00985U

**Percha p/Suministro de Fluidos\***  
28" (71 cm) de alto, base de 5" x 8" (12 x 20 cm), varilla de acero con gancho de 5/16" (1 cm). Peso 4 lbs. LF01022U

**Juego p/Suministro de Fluidos\***  
Incluye bolsa de fluidos con tubo y junta. Peso de envío 0.25 lbs. (0.11 kg).  
LF01098U


## Life/form® Simuladores de Cateterización Urinaria

La cateterización es una de las habilidades básicas de los estudiantes de enfermería, y para aprenderla deben practicarla. ¿Algún voluntario? ¡No! Pero los Life/form® simuladores permiten demostraciones y prácticas de cateterización urinaria sin incomodidades del paciente o del estudiante. Además, son útiles para la identificación anatómica y la demostración del cuidado perineal. El realismo del Life/form® Simulador de Cateterización Urinaria ayudará a cubrir el vacío que va del salón de clases al paciente con facilidad y comodidad. Al igual que con un paciente, el manguito debe estar desinflado antes de retirar el catéter. El uso inadecuado de un Foley puede dar lugar a daños en el simulador, al igual que cuando se usa un catéter Foley con un paciente real. Tres años de garantía. **Nota:** Puede usarse un catéter Foley de silicón de 16 FR si se tiene extremo cuidado al inflar el manguito solo cuando está en posición adecuada. Se recomienda el uso del catéter Foley de silicón.

### Life/form® Simulador de Cateterización para Mujeres\*

Este Simulador tiene un espacio para la vejiga, la uretra y una válvula que simula el esfínter uretral interno. La sensación de resistencia y presión será la misma cuando pase el catéter por la uretra y el esfínter hasta la vejiga. Cuando la sonda penetre la vejiga, la orina artificial bajará por la sonda como ocurriría con una paciente. Y el manguito debe estar desinflado antes de retirar la sonda. El uso inadecuado de una sonda Foley puede dañar el simulador, tal como ocurrirá a la sonda con un paciente real. Este simulador es el torso de una mujer de edad mediana con los muslos en la posición adecuada durante la cateterización. Los genitales externos y el perineo se han moldeado con modelos reales. Los labios menores pueden apartarse de manera natural para mostrar el clítoris, el introito uretral y el vaginal. Incluye estuche rígido, lubricante, catéter de silicón, sonda e instructivo. No se incluye percha para suministro de fluidos. Tres años de garantía. Tamaño de la caja: 24" x 16" x 13" (61 x 40 x 33 cm). Peso 21 lbs. (9.53 kg). LF00856U


### Life/form® Detalle

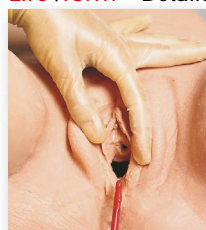

### Life/form® Simulador de Cateterización para Hombres\*

Con el rediseñado Life/form® Simulador de Cateterización para Hombres, la cateterización puede practicarse como con un paciente de verdad. Puede insertarse una sonda lubricada en el orificio uretral y pasarla hasta la vejiga. Cuando la vejiga recibe la sonda, la orina artificial (agua) comienza a fluir por el catéter. El estudiante sentirá las restricciones normales causadas por los pliegues mucosos, la uretra bulbosa y el esfínter uretral interno, justo antes de la entrada de la vejiga. La experiencia enseña la posición y el movimiento adecuados del pene para permitirle al paciente que la sonda pase con la menor incomodidad posible. Como con el paciente de verdad, el manguito debe estar completamente desinflado antes de retirar el catéter. El uso inadecuado de un catéter Foley puede dañar el simulador. Incluye estuche rígido, lubricante, catéter e instructivo. No se incluye percha para suministro de fluidos. Tres años de garantía. Tamaño de caja: 17" x 12" x 10" (43 x 30 x 25 cm). Peso de envío 12 lbs. (5.44 kg). LF00855U

LF01098U

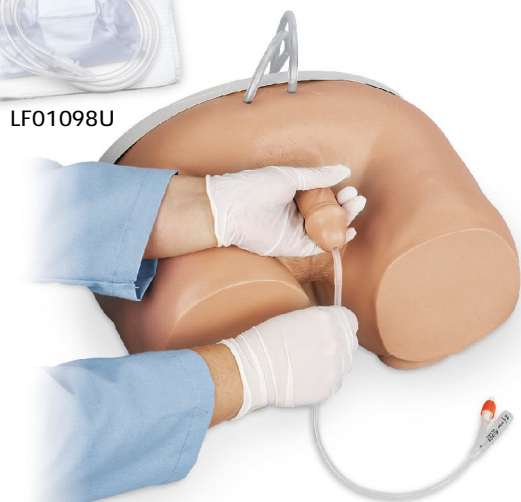

Life/form® Simuladores de Cateterización para Hombres y Mujeres\*  
Incluye un Simulador de Cateterización para Mujeres (LF00856U) y otro para Hombres (LF00855U). Peso de envío 33 lbs. (14.97 kg).  
LF00857U

### ARTÍCULOS DISPONIBLES

**Catéter Foley de Silicón\***  
16 FR 5 cc. Cada uno. Peso 0.25 lbs. LF01127U  
16 FR 5 cc. Paquete de 10.  
Peso de envío 0.63 lbs. (0.29 kg).  
LF01128U

**Juego de Suministro de Fluidos\***  
Con adaptador para simuladores de Cateterización para Hombres y Mujeres. Incluye bolsa de fluido con sonda y accesorio. Peso 0.25 lbs. LF01098U

**Percha para Suministro de Fluidos\***  
28" (71 cm) de alto, base de 5" x 8" (12 x 20 cm), varilla de acero con gancho de 5/16" (1 cm). Peso 4 lbs. (1.81 kg).  
LF01022U

**Juego Lubricante\***  
Botella de 2 oz. Paquete de 6. Peso de envío 0.88 lbs. (0.40 kg).  
LF00985U

**Limpiador Nasco\***  
Úselo para quitar manchas rebeldes de los Life/form® simuladores y entrenadores. Botella de 12 oz (355 ml). Peso 0.88 lbs. (0.40 kg).  
LF09919U



\*Fabricado usando un sistema de control de calidad certificado conforme a la norma ISO 9001 e ISO 13485.